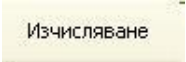
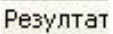


задавар координатите на антагонистите измерени от линията на симетрия, по билото на костта, от томографска снимка. При положение, че липсват зъби и в двете челюсти тогава за примерни координати може се използват [тези](#). В поле Пародонт се поставя по преценка на лекаря коефициент отговарящ на остатъчният пародонт. Този коефициент се умножава по съответната големина на дъвкателната сила от представаната таблица.

Средни големина на дъвкателните сили [Балабанов]

Зъб	1	2	3	4	5	6	7
Горна челюст, кг	13,5	15,5	20,5	23	20,5	45	41,5
Долна челюст, кг	15	14	18	16	15	30,5	31,5

Поле размер е с информативна функция за големината на липсващата зъбна редица.

След въвеждане на всички необходими данни се избира бутонът  или  и програмата изчислява местоположението на съответният брой импланти или глави на СПИ и изписва техните координати **X** спрямо горната челюст с начало линията на симетрия.

Избора на функциите **Зареждане** и **Запис**, от Менюто на програмата, извикват и създават файл с направените изчисления.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Може да бъде избрана всяка линия за начало на координатното измерване стига да се им в предвид, че дъвкателните сили са от съществуващите антагонисти докато мястото на импланта е спрямо същото начало, но от страната на липсващите зъби.
2. Важно е липсващите зъби да се избират последователно докато обособят една протеза. За всяка следваща протеза трябва да се създават отделни файлове.